

VetExpert CAV Ag

Одношаговый экспресс-тест для выявления аденовируса собак (Canine Adenovirus type 1, type2)

Чувствительность 94%

Специфичность 97%

Внимание: Используемые в тесте образцы и все компоненты набора должны быть одинаковой комнатной температуры.

VetExpert CAV Ag. Методика исследования мочи (CAV-1): предпочтительный метод выявления возбудителя вирусного гепатита собак

1. Сухим тампоном или пипеткой для образцов возьмите 2-3 капли мочи.
2. Изготовьте пробу: а) тампоном с образцом в течение 10 секунд перемешивайте аналитический раствор в пробирке ИЛИ б) взятой пипеткой мочу добавить к аналитическому раствору и перемешивайте той же пипеткой в течение 10 секунд, предпочтителен способ "пипетирование".
3. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
4. Пипеткой внесите в лунку на тест-кассете 4 капли пробы, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
5. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - пятую - каплю пробы.
6. Оцените результат теста через 5...10 минут.



VetExpert CAV Ag. Методика исследования секрета конъюнктивы и назальных выделений (CAV-2): метод выявления возбудителя вирусного ларинготрахеита собак

1. Тампон увлажните физиологическим раствором и возьмите им секрет конъюнктивы, а затем тем же тампоном возьмите назальные выделения.
2. Изготовьте пробу: тампоном с образцом в течение 10 секунд перемешивайте аналитический раствор в пробирке.

3. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
4. Пипеткой внесите в лунку на тест-кассете 4 капли пробы, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
5. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - пятую - каплю пробы.
6. Оцените результат теста через 5...10 минут.



Интерпретация результата



VetExpert CAV Ag. Методика исследования сыворотки или плазмы крови (CAV-1): метод инвазивный, рекомендован в исключительных случаях

1. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
2. Пипеткой для образцов внесите в лунку на тест-кассете 4 капли сыворотки или плазмы.
3. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - пятую - каплю образца.
4. Оцените результат теста через 5...10 минут.