

VetExpert CPV/CCV Ag

Одношаговый экспресс-тест для выявления парвовируса и коронавируса собак (Canine Parvovirus, Coronavirus)

Чувствительность - CPV 100%, CCV 93,1%

Специфичность - CPV 100%, CCV 97,5%

Внимание: Используемые в тесте образцы и все компоненты набора должны быть одинаковой комнатной температуры.

VetExpert CPV/CCV Ag. Методика исследования фекалий

1. Тампоном возьмите фекалии или ректальный мазок.
2. Изготовьте пробу: тампоном с образцом в течение 10 секунд перемешивайте аналитический раствор в пробирке.
3. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
4. Пипеткой внесите в лунку на тест-кассете 4 капли пробы, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
5. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - пятую - каплю пробы.
6. Оцените результат теста через 5...10 минут.



* В случае водянистой диареи сбор ректального мазка можно осуществлять не ранее чем через 30 минут после испражнения, поскольку вирус смывается с кишечного эпителия. При отрицательном результате может понадобиться повторить исследование до 5 раз. Поэтому при получении отрицательного результата в случае водянистой диареи рекомендуем для повторного тестирования использовать в качестве биологического материала сыворотку или плазму крови.

* В исключительных случаях, если вы приняли решение исследовать сыворотку или плазму крови, необходимо дополнительно к набору иметь капиллярную пипетку с объемом капли 10 мкл и пробирку для образца крови.

VetExpert CPV/CCV Ag. Методика исследования сыворотки или плазмы крови

1. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
2. Капиллярной пипеткой (объем капли 10 мкл) внесите в каждую из двух лунок на тест-кассете 1 каплю образца сыворотки или плазмы.

Риской на пипетке обозначен уровень, соответствующий объему одной капли



3. Добавьте в каждую лунку кассеты пипеткой для взятия пробы 3 капли (объем капли - 30 мкл) аналитического разбавителя из пробирки, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
4. Если через 1 минуту в каком-либо из двух окон результатов тест-кассеты не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - четвертую - каплю аналитического разбавителя в соответствующую лунку.
5. Оцените результат теста через 5...10 минут.