

## VetExpert FCoV Ag

### Одношаговый экспресс-тест для выявления коронавируса кошек (Feline Coronavirus)

**Чувствительность 92,8%**

**Специфичность 98,1%**

**Важно:** Используемые в тесте образцы и все компоненты набора должны быть одинаковой комнатной температуры. Отбор образцов ректального содержимого или фекалий осуществляют с помощью тампона из набора.

## VetExpert FCoV Ag. Методика исследования фекалий

### 1. Изготовление тестовых проб:

- тампон с образцом поместить в пробирку с аналитическим разбавителем;
- тампоном с образцом в течение 10 секунд тщательно перемешать аналитический разбавитель в пробирке.

### 2. Извлечь тест-кассету из упаковки и разместить на ровной сухой поверхности.

3. Используя индивидуальную пипетку из набора, поместить 5 капель пробы в лунку на тест-кассете, не торопясь, одну за другой. Держать пипетку строго вертикально.

4. Когда тест начнет действовать, в окне результатов тест-кассеты проявится фоновое окрашивание, постепенно продвигающееся вдоль мембраны. Если через 1 минуту цвет не появится, добавьте в соответствующую лунку еще одну (шестую) каплю аналитического разбавителя.

### 5. Оценить результат теста через 5...10 минут.

#### Внимание:

- \* За один прием не выливать в лунку порцию пробы более чем из одной капли.
- \* Время оценки результатов теста (5...10 мин) указано с учетом того, что тест проводят при температуре +15...30°C. Если температура в помещении ниже +15 °C, время для оценки результатов должно быть соответственно увеличено (5...20 мин).
- \* Не интерпретировать результат по истечении 20 минут.



**\* В исключительных случаях, если вы приняли решение исследовать сыворотку или плазму крови, необходимо дополнительно к набору иметь капиллярную пипетку с объемом капли 10 мкл и пробирку для образца крови.**

## VetExpert FCoV Ag. Методика исследования сыворотки или плазмы крови

1. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.

**2.** Капиллярной пипеткой (объем капли 10 мкл) внесите в лунку на тест-кассете 1 каплю образца сыворотки или плазмы.

*Риской на пипетке обозначен уровень, соответствующий объему одной капли*



**3.** Добавьте в лунку кассеты пипеткой для взятия пробы 3 капли (объем капли - 30 мкл) аналитического разбавителя из пробирки, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.

**4.** Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - четвертую - каплю аналитического разбавителя.

**5.** Оцените результат теста через 5...10 минут.