

VetExpert FCoV Ab

Одношаговый экспресс-тест для выявления антител против коронавируса кошек (Feline Coronavirus)

Чувствительность 96% Специфичность 97,9%

Внимание: Используемые в тесте образцы и все компоненты набора должны быть одинаковой комнатной температуры.

В течение 72 часов образцы можно хранить при температуре +2..7°C, для более длительного хранения их следует заморозить и хранить при температуре не выше -20°C в непроницаемых воздушных сосудах.

VetExpert FCoV Ab / Методика выполнения исследования

1. Извлеките из упаковки тест-кассету и пипетку. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
2. Пипеткой внесите в лунку на тест-кассете 1 каплю (около 10 мкл) образца сыворотки или плазмы.

Риской на пипетке обозначен уровень, соответствующий объему одной капли



3. Добавьте в лунку 3 капли (около 90 мкл) аналитического разбавителя из флакона, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку и флакон строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
4. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - четвертую - каплю аналитического разбавителя.
5. Оцените результат теста через 5...10 минут.


Внимание:

- * За один прием не выливать в лунку порцию жидкости более чем из одной капли.
- * Время оценки результатов теста (5...10 мин) указано с учетом того, что тест проводят при температуре +15...30°C. Если температура в помещении ниже +15 °C, время для оценки результатов должно быть соответственно увеличено (5...20 мин).
- * Не интерпретировать результат по истечении 20 минут.


Сыворотка или плазма




Интерпретация результата

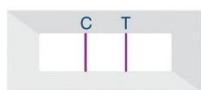

положительный

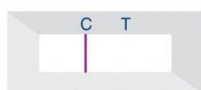

отрицательный

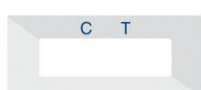

некорректный
повторить
тест

