

## VetExpert CDV Ag

### Одношаговый экспресс-тест для выявления вируса чумы плотоядных (Canine Distemper Virus)


Чувствительность 100%

Специфичность 100%

**Внимание:** Используемые в тесте образцы и все компоненты набора должны быть одинаковой комнатной температуры.

### VetExpert CDV Ag. Методика исследования секрета конъюнктивы, назальных выделений, слюны, мочи, фекалий

1. Тампон увлажните физиологическим раствором и возьмите им секрет конъюнктивы, назальные выделения или слюну; для отбора мочи используйте сухой тампон или пипетку для образцов; для отбора фекалий используйте сухой тампон.
2. Изготовьте пробу: тампоном с образцом в течение 10 секунд перемешивайте аналитический раствор в пробирке; ИЛИ взятые пипеткой 2-3 капли мочи в течение 10 секунд перемешивайте с аналитическим разбавителем той же пипеткой.
3. Извлеките из упаковки тест-кассету. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
4. Пипеткой внесите в лунку на тест-кассете 4 капли пробы, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
5. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - пятую - каплю пробы.
6. Оцените результат теста через 5...10 минут.

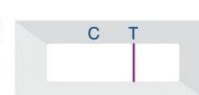


**Интерпретация результата**

\* В исключительных случаях, если вы приняли решение исследовать сыворотку или плазму крови, необходимо дополнительно к набору иметь капиллярную пипетку с объемом капли 10 мкл и пробирку для образца крови.

## VetExpert CDV Ag. Методика исследования сыворотки или плазмы крови

1. Извлеките из упаковки тест-кассету и пипетку для взятия пробы. Разместите кассету на ровной сухой поверхности.
2. Капиллярной пипеткой (объем капли 10 мкл) внесите в лунку на тест-кассете 1 каплю сыворотки или плазмы.

*Риской на пипетке обозначен уровень, соответствующий объему одной капли*

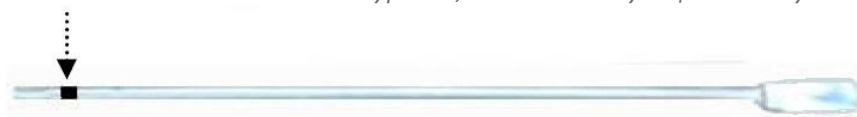

3. Добавьте в лунку кассеты пипеткой для взятия пробы 3 капли (объем капли - 30 мкл) аналитического разбавителя из пробирки, не торопясь, одну за другой. Держите пипетку строго вертикально, на небольшом расстоянии от лунки. Не выливайте в лунку за один прием более 1 капли.
4. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну - четвертую - каплю аналитического разбавителя.
5. Оцените результат теста через 5...10 минут.